



DENTIRO® Sensitive

Plně virucidní povrchový dezinfekční prostředek s příjemnou citrónovou vůní a obsahem alkoholu menším než 50 %.

- ▶ **Zabíjí 101 patogenů**
- ▶ **Účinné během 60 sekund**
- ▶ **Kompatibilní se 110 materiály včetně umělé kůže**
- ▶ **Obsah alkoholu nižší než 50 %**
- ▶ **Testováno podle 18 evropských norem**

DENTIRO® Sensitive je plně virucidní přípravek na bázi alkoholu a kvartérních amoniových sloučenin. Dezinfekční sprej je ideální pro rychlou dezinfekci a čištění neinvazivního zdravotnického vybavení, jako např. operačních stolů, vyšetřovacích křesel, IV stojanů a lehátek. DENTIRO® Sensitive je baktericidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, účinný proti kvasinkám, fungicidní a plně virucidní během 60 sekund. Tento výrobek má díky obsahu alkoholu pod 50 % velmi dobrou snášenlivost s různými materiály a snižuje možnost výskytu alergií či podráždění. DENTIRO® Sensitive je snadno biologicky odbouratelný, s lehkou citronovou vůní.

Předmět použití



- ▶ Pro rychle účinnou dezinfekci postříkem s ubrouskem a čištění povrchů neinvazivních zdravotnických nástrojů jako např. laboratorních stolů, stomatologických křesel, povrchů jednotek, misek na nástroje, vrtáků, násadců, držáků operačních světel a nástrojů vyrobených z oceli, hliníku, mědi, silikonu nebo gumy

Použití



Dezinfikované plochy a předměty důkladně navlhčete. Dodržte dobu expozice. Pokud je to nutné, vysušte povrch nebo objekt jednorázovou utěrkou. Aplikujte jen na materiály, které snáší působení alkoholu. U citlivých materiálů otestujte před použitím jejich snášenlivost na malých plochách.

Spektrum účinnosti / doba expozice



Baktericidní	60 sekund
Bakterie odolné vůči antibiotikům	60 sekund
Tuberkulocidní	60 sekund
Mykobaktericidní	60 sekund
Protikvasinkový	60 sekund
Kvasinky odolné vůči antibiotikům	60 sekund
Fungicidní	60 sekund
Obalené viry	30 sekund
BVDV	30 sekund
Koronavirus	30 sekund
Virus hepatitidy B	30 sekund
Virus hepatitidy C	30 sekund
Virus herpes simplex	15 sekund
HIV	30 sekund
Virus chřipky typu A	15 sekund
Virus pseudorabies	30 sekund
Virus vakcinie	15 sekund
Neobalené viry	60 sekund
Adenovirus	60 sekund
Poliovirus	60 sekund
Polyomavirus	60 sekund
Rotavirus	15 sekund

V souladu s Standardní metody DGHM, EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 1656, EN 1657, EN 13610, EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14204, EN 14348, EN 14349, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN 14675, RKI / DVV pokyny, Přípravky registrované u VAH / DGHM.





Kompatibilita



Polyethylen	Kompatibilní.
Polytetrafluoethylen	Kompatibilní.
Polypropylen	Kompatibilní.
Polyvinylchlorid	Kompatibilní.
Plexisklo	Kompatibilní.
Silikonová pryž	Kompatibilní.
Pryž	Kompatibilní.
Ocel	Kompatibilní.
Litina	Kompatibilní.
Hliník	Kompatibilní.
Měď	Kompatibilní.
Mosaz	Kompatibilní.
Polyvinylchlorid (měkký)	Kompatibilní s omezeními.

Nebezpečí



H226 Hořlavá kapalina a pára. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným ohněm/žhavými povrchy. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/páry/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je možné je snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s příslušnými pravidly.



100 g obsahuje



20 g ethanol, 28 g 1-propanol,
0.056 g kvartérní amonné sloučeniny

Fyzikální vlastnosti



Skupenství:	Čirá, neviskózní kapalina
Barva:	Bezbarvý
Vůně:	obsahuje alkohol, citronová
Hodnota pH:	Neutrální.
Doba použitelnosti:	48 měsíců (neotevřený obal) Neuplatňuje se. (použitý pracovní roztok)

Balení



250 ml lahev, 1 l lahev s odklápěcím
uzávěrem, 5 l kanistr

Váš distributor



SCHAFFEROVÁ spol. s r. o.
Andelská 29
77900 Olomouc
Česká republika
Telefon: +420 585 757 200
Fax: +420 585 757 209
info@schafferova.cz
www.schafferova.cz
www.facebook.com/schafferova

