

INCIDIN LIQUID

Kapalný dezinfekční přípravek na bázi alkoholů k přímému použití pro rychlou a bezpečnou dezinfekci předmětů a ploch postřikem.

INCIDIN LIQUID je deklarován jako zdravotnický prostředek, třída IIa

CE 0297

Výhody pro uživatele:

- vhodné pro lesklé plochy (nerez, sklo). Povrch je po použití lesklý, beze šmouh a skvrn.
- neředí se, působí rychle, zasychá a nezanechává zbytková rezidua
- neobsahuje aldehydy ani jiné přídavné látky
- jeho složení je kompatibilní s materiály z kovu a plastů odolných vůči alkoholu

Spektrum účinnosti: baktericidní, fungicidní, virucidní (omezené spektrum virů vč. HBV, HIV) a tuberkulocidní

Obsah účinných látek ve 100 g přípravku: 35 g 2-propanolu, 25 g n-propanolu

Oblast použití: Incidin liquid se uplatní pro plošnou dezinfekci ve všech typech zdravotnických zařízení, je ideální pro stomatologické ambulance, penziony seniorů, v práci pečovatelské služby, v provozu sanitek a při přepravě pacientů vůbec. Doporučujeme jej i pro práci v laboratořích, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v provozovnách kosmetiky, holičství, manikúry, pedikúry, soláriích, v masérských a lázeňských službách. Lze jej použít pro rychlou a bezpečnou dezinfekci všech ploch a předmětů odolných vůči alkoholům.

Použití	doba expozice
Účinnost proti bakteriím (včetně MRSA) EN 13727 C/D	1 minuta
EN 13697 C/D	1 minuta
Účinnost proti kvasinkám EN 13624 C/D	1 minuta
EN 13697 C/D	1 minuta
Účinnost proti HBV, HIV, HCV	1 minuta
Účinnost proti TBC EN14348 C/D	1 minuta
Účinnost proti virům	
Rota	1 minuta
Adeno	5 minut
Papova	10 minut
Noro virus (MNV) (DVV/RKI)	10 minut

Návod k použití: neředěný přípravek naneste pomocí suché buničiny nebo nastříkejte ze vzdálenosti asi 30 cm (40 ml/m²) na dezinfikované plochy a nechte jej zaschnout.

Bezpečnost: Přípravek je klasifikován jako nebezpečný pro zdraví člověka dle nařízení (ES) č. 1272/2008 (Varování; Hořlavé kapaliny, Kategorie 3, H226; Podráždění očí, Kategorie 2, H319; Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, Kategorie 3, Centrální nervový systém; H336) nebo směrnice 1999/45/ES (Xi; DRÁŽDIVÝ; R10; R36; R67).
Před použitím čtěte přiložené pokyny.

Při práci s koncentrovaným přípravkem dodržujte pokyny pro bezpečné zacházení, které naleznete v příslušném bezpečnostním listu přípravku.

Bezpečnostní upozornění:

R10: Hořlavý.

R41: Nebezpečí vážného poškození očí.

S2: Uchovávejte mimo dosah dětí.

S7: Uchovávejte obal těsně uzavřený.

S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

S26: Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Nestříkejte do otevřené hořlavé nebo na žhavé předměty. Elektrické přístroje vypojte ze zásuvky, příp. prověřte jejich ochranu vůči explozi.

Skladování: skladujte v uzavřeném originálním obalu na suchém a tmavém místě při teplotách do 25°C. Informaci o firmách zabezpečujících zneškodnění obalů a nespotřebovaných částí výrobku obdržíte u pověřeného místně příslušného správního úřadu.

Minimální trvanlivost: 48 měsíců

Balení:

5 l PE kanystr baleno v kartonu po 2 ks

1l PE láhev baleno v kartonu po 12 ks